



WOLTURNUS

# Brugermanual

**For Wolturnus Carbon Rollator**

- Athlon SL



REHASENSE



Wolturnus A/S anbefaler at brugeren læser denne manual inden brug af rollatoren



REHASENSE

## 1. Indledning

Kære kunde

Vi glæder os over, at De har købt et førsteklases Rehasense produkt. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt brug af produktet. Derfor bedes De læse denne vejledning grundigt, før produktet tages i anvendelse. Venligst vær opmærksom på alle forholdsregler, især sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så De opnår en sikker og langvarig anvendelse af produktet.

### Formålsbeskrivelse

Rollatoren er beregnet til personer, som pga. bevægelsesproblemer har brug for støtte ved gang men som selv er i stand til at bruge rollatoren uden at komme til skade eller øve skade på andre. Takket være sædet kan brugeren til enhver tid sætte sig for at få en pause. Rollatoren må kun bruges til at komme frem med og til kortvarigt at sidde på.

### NB

Rollatoren må kun bruges af personer, der pga. deres sundhedstilstand har brug for stabil støtte ved gang.

Rollatoren bør ikke bruges af personer med eksempelvis balanceproblemer eller svækket muskelkraft, og som derfor ikke kan bruge rollatoren uden selv at komme til skade eller skade andre.

Ved spørgsmål til produktet bedes De henvende dem til:

Wolturnus A/S  
Halkærvej 24B  
9240 Nibe  
Danmark

E-mail: [info@wolturnus.dk](mailto:info@wolturnus.dk)

## 2. Sikkerhedsanvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktionsændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- Pas på ikke at få fingrene i klemme eller få andre skader ved alle rollatorens samlinger samt i forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m.
- Check at begge bremsere fungerer inden ibrugtagning
- Benyt kun rollatoren, når den er fuldt udklappet og med låsemekanismen helt fastlåst
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag indendørs og udendørs
- Alle hjul skal til hver en tid være i kontakt med underlaget. Dette sikrer, at rollatoren er i balance og derved undgår evt. uheld.
- Når rollatoren anvendes til at sidde på, SKAL bremserne blokeres.
- Begge bremsehåndtag skal aktiveres og blokeres på én gang
- Efterlad aldrig en rollator ulåst i bremsefunktionen
- Produktet må aldrig udsættes for større belastning end i alt 150 kg,
- Indkøbstaken kan max. bære 5 kg og må IKKE belastes mere end det.



WOLTURNUS



REHASENSE

### 3. Beskrivelse




WOLTURNUS

#### Produktbeskrivelse

"Wolturnus Carbon Rollator" (Athlon SL) har en super let ramme af kulfiber og er udstyret med 4 hjul. Letvægts-kulfiberrammen gør det let at folde rollatoren sammen, samt opbevare og transportere den fx i bilen. Den er let at manøvrere og er tilstrækkelig stabil. Skubbehåndtagene kan indstilles i højden. Rollatoren er fra fabrikken af udstyret med et monteret sæde og en indkøbstaske.

#### Leverancen omfatter

- ✓ 1 rollator, sammenklappet, inkl. sæde og indkøbstaske
- ✓ 1 stokkeholder sæt
- ✓ 1 brugervejledning

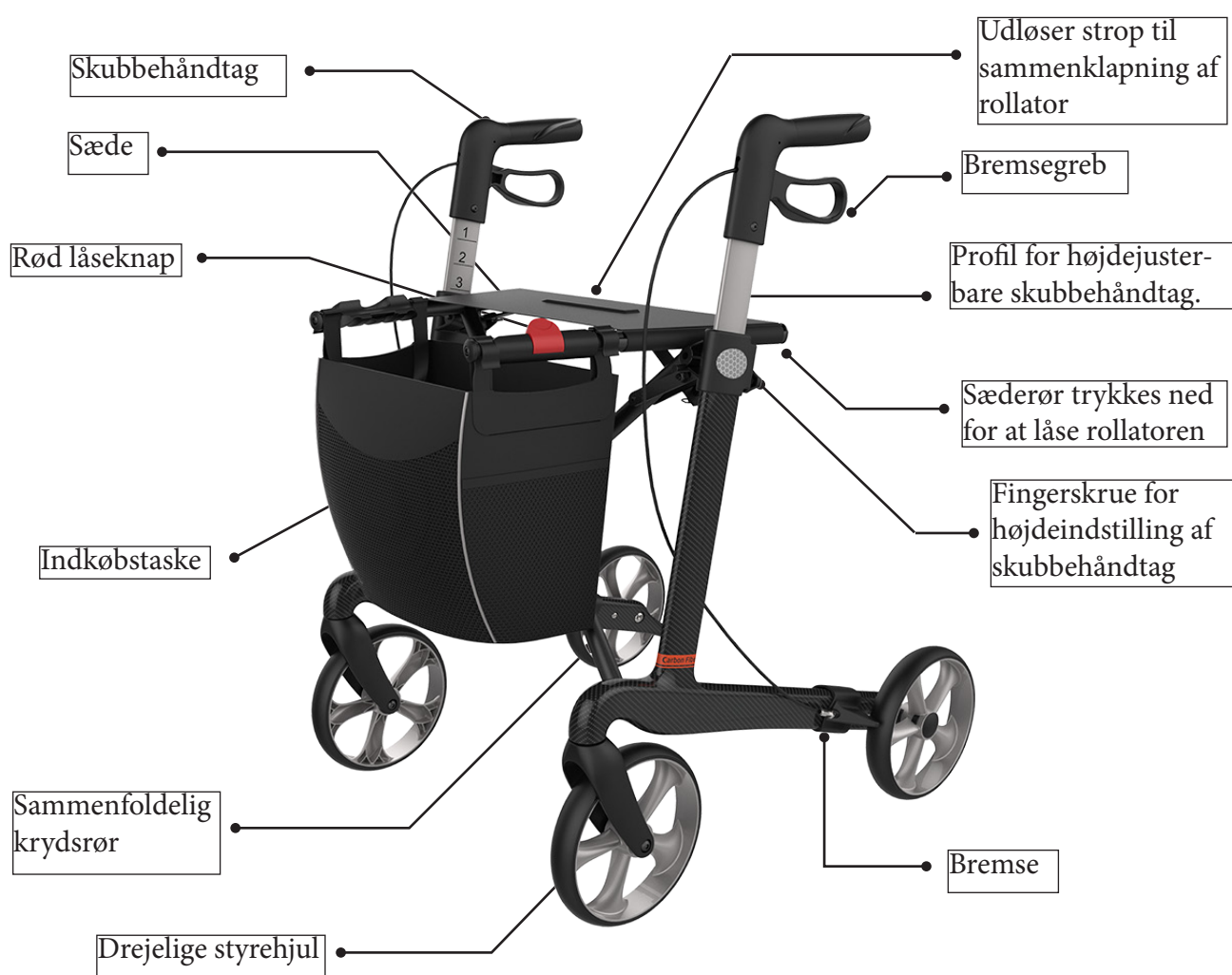

#### Kontrol ved modtagelsen

Efter at De har pakket rollatoren ud, skal De først kontrollere, om noget mangler, og om alle delene, der er vist på tegningen, er der. Hvis De konstaterer, at der mangler nogle dele, skal De straks kontakte forhandleren.



REHASENSE



WOLTURNUS

### Klargøring

- Sæt rollatoren med hjulene på gulvet. Tryk på den røde knap og tag fat om rørene ved sædet. Tryk disse nedad, indtil der høres et klik i låsemekanismen. Nu er rollatoren foldet ud og sikret mod at falde sammen.
- Kontroller inden brug at boltene, der fastgør hjulene, er korrekt fastgjorte, og at rollatoren er stabil, således at ingen dele kan bevæges.
- Kontroller endvidere bremsens funktion, før rollatoren anvendes



### Sammenfoldning af rollator

- For at folde rollatoren sammen skal der trækkes opad i stroppen midt på sædet.
- Derefter udløses låsemekanismen, og rollatoren kan foldes sammen.

### Højdeindstilling af skubbehåndtag

- For at indstille højden på skubbehåndtagene løsnes fingerskruen.
- Derefter indstilles håndtagene i den ønskede højde, hvorefter skruen igen fastspændes.



Vær opmærksom på at begge håndtag skal være indstillet i samme højde. Korrekt indstillede håndtag bør ca. være i brugerens albuehøjde, når denne står med løst hængende arme.

### Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til rollatoren (fx rygstøtte, bord, slæbebremse, enhåndsbremse m.v.). Kontakt Deres forhandler for yderligere informationer.

### Håndtering under transport

Det anbefales at transportere rollatoren i sammenfoldet stand. Dens konstruktion gør det muligt på en let måde at folde den ud og folde den sammen. Man bør sikre sig, at rollatoren befinder sig i en stabil position under transporten, så den ikke bliver skæv.

### Anvendelse

Stil Dem midt bag ved baghjulene, tag fat om håndtagene og udløs bremserne. Bremserne er specialudviklet, således at kun en lille kraftanstrengelse er nødvendig.

## 4. Teknisk data

TEKNISK DATA	
TOTALBREDDE ÅBEN / FOLDET	61 CM / 22,5 CM
SÆDEBREDDE	46 CM
LÆNGDE	68 CM
SÆDEHØJDE	M/55 CM - L/62 CM
HØJDE PÅ SKUBBEHÅNDTAG	M/66 - 86 CM - L/74 - 102 CM
MAX BRUGERVÆGT	150 KG
MAX BELASTNING AF INDKØBSTASKE	5 KG
TOTALVÆGT U. TASKE	M/5,1 KG - L/5,2 KG (+TASKE 370 G)
BREMSER	2 X HÅNDBREMSER MED LÅSEFUNKTION




REHASENSE



WOLTURNUS

## Produktlabel

Findes på indersiden af den vertikale sideramme:

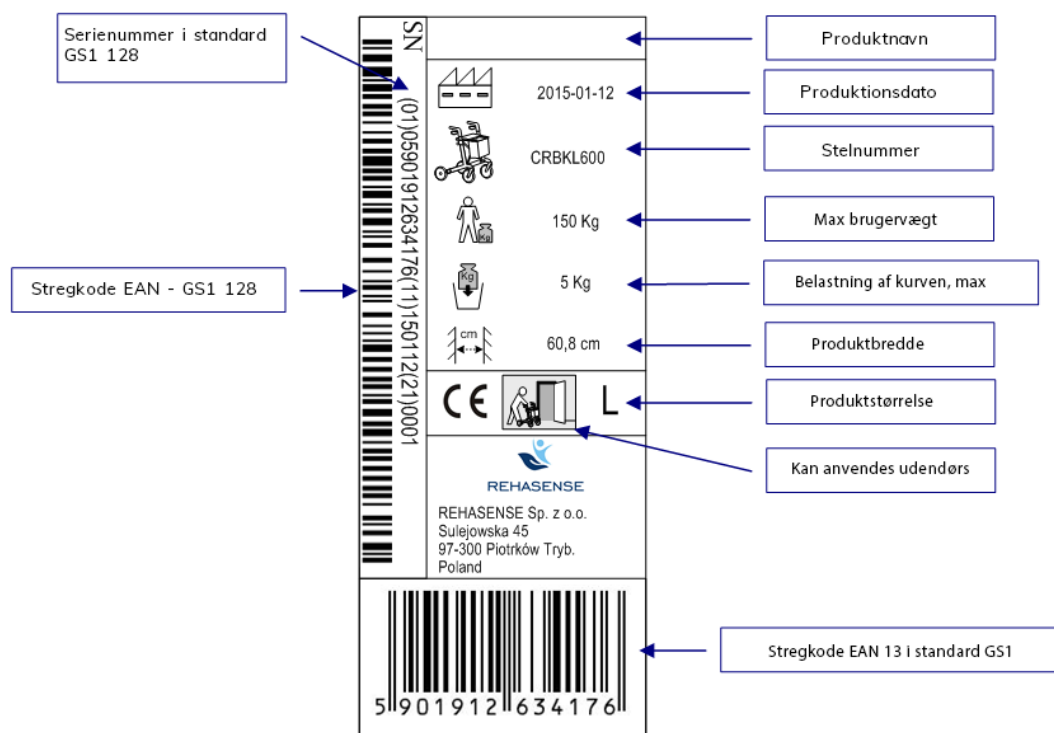

## 5. Vedligeholdelse

Normalt snavs på metal- og plastdele kan fjernes med gængse rengøringsmidler. Benyt kun milde sæbemidler, Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuremidler, ej heller stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Trods den stabile konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer vil rollatoren blive udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at få en fagmand til at checke den efter jævnlige (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør følgende checkes efter: Visuel kontrol af alle rammedele hvad angår skævheder, beskadigelser, slid og korrosion samt i særdeleshed kontrol af:

- Rollatorstellet
- Skubbehåndtag og greb
- Bremseregreb og bremsekabler
- Styregafler og forhjul
- Baghjul med brems
- Sæde og låseanordning
- Indkøbstaske
- Check efter om der mangler nogle montage dele (fx møtrikker, skruer, nitter...) og om de fungerer og er i god stand

## Rensning af hjulene

Det anbefales at rengøre hjulene med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Foretag også smøring af lejer ved at spraye et smøremiddel på engang imellem eller når hjulene begynder at knirke.



## 6. Genanvendelse

Rollatoren er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse skal den rengøres og desinficeres samt være kontrolleret i henhold til pkt. 5.



Vær opmærksom på at hvis rammen er bøjet eller brækket må dette ikke genanvendes, men hele rammen/rollatoren skal udskiftes.

## 7. Generel problemløsning

PROBLEMBESKRIVELSE	MULIGE ÅRSAGER	LØSNING
Rollatoren kan kun med besvær skubbes eller styres	Der er skidt mellem hjulene eller gaflerne	Rengør mellem hjul og gaffel. Aftag evt. hjulet. smør de bevægelige dele med smøreolie
Bremserne virker ikke som de skal eller én af bremserne virker bedre end den anden	Bemseskoene er slidte eller bremserne er ikke justeret korrekt	Forsøg at justere bremsekablet eller udskift bemseskoene. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren.
Sædet låser ikke i korrekt position.	Kontroller om låsemekanismen går i indgreb eller om den er defekt. Se om der evt. sidder noget i vejen eller om noget ikke er fastspændt.	Kontroller eller udskift låsemekanismen. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren.

## 8. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsp-lads.

## 9. Garanti

Rehasense Sp. z o.o. yder garanti på alle solgte produkter mod materiale- og produktionsfejl i den garantiperiode, det pågældende lands lovgivning foreskriver. Rehasense Sp. Z o.o. er ikke ansvarlig for skader, der er opstået som følge af u hensigtsmæssig eller forkert montage og/eller reparation, forsømmelse og slid samt ændring af komponenter foretaget af bruger eller tredie-mand. I sådanne tilfælde bortfalder CE-mærket og produktansvaret.

Garantien dækker ikke dele, som pga. normal brug er blevet slidt.

Garantien dækker ikke transportudgifter samt krav om skadeserstatning i forbindelse med at produktet ikke kan benyttes i reparationsperioden. Endvidere er der ingen garanti mod skader, der opstår som følge af manglende overholdelse eller misforståelse af denne brugervejledning.

I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl bedes De straks tage kontakt til Wolturnus A/S.

## 10. Konformitetserklæring (CE)

Rehasense Sp. z o.o., Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski, Poland, erklærer hermed, at Rehasense Sp. z o.o rollator model "ATHLON SL" er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

Direktiv 93/42/EF for medicinalprodukter, Del I af 14. juni 1993